



Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Beachten Sie bitte folgende Hinweise im Umgang mit der Flüssigsauerstoffversorgung HEIMOX®



In der Umgebung der stationären sowie tragbaren Flüssigsauerstoffbehälter nicht rauchen.

Halten Sie Zigaretten oder brennenden Tabak vom Betriebsbereich fern.



Entflammbare Materialien von den Behältern fernhalten.

Öl und Fett, einschliesslich fettende Gesichtscreme und Vaseline, sind leicht entzündlich und brennen in Anwesenheit von konzentriertem Sauerstoff extrem schnell. Unternehmen Sie nie den Versuch, die Behälter zu ölen.



Kontakt mit Flüssigsauerstoff oder Teilen des Behälters, die mit Flüssigsauerstoff in Berührung gekommen sind, vermeiden.

Flüssigsauerstoff ist extrem kalt (-183 °C). Bei Berührung können der Flüssigsauerstoff oder Teile des Behälters, die mit Flüssigsauerstoff in Kontakt waren, zu Kaltverbrennungen der Haut führen.

Bei Kontakt von kälteverflüssigtem Sauerstoff mit der Haut oder mit den Augen müssen diese Bereiche sofort mit grossen Mengen warmen Wasser behandelt werden; bei derartigen Verletzungen ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.




Nicht brennbares, ungiftiges Gas.

Sauerstoff ist ein nicht brennbares, ungiftiges Gas, welches die Verbrennung von Stoffen stark beschleunigt.



Gefahr der Brandbeschleunigung.

Eine hohe Sauerstoffkonzentration kann eine extrem rasche Verbrennung anderer Stoffe verursachen.

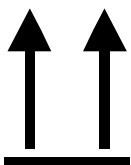

Die stationären und tragbaren Behälter ausschliesslich in der aufrechten Position lagern und verwenden.

(Gilt nicht für die tragbaren Behälter T300 und T850) – Wenn der stationäre oder tragbare Behälter umfällt, den Raum gut lüften und Linde Healthcare benachrichtigen.



Die Behälter in mindestens 1,5 m Entfernung von Elektrogeräten halten.

Verwenden und lagern Sie die stationären sowie tragbaren Behälter in mind. 1,5 m Entfernung von Elektrogeräten, die Hitze oder Funken abgeben können.



Die Behälter von offenen Flammen fernhalten.

Heizquellen wie Herde oder Öfen können offene Flammen enthalten.




Die Behälter in einem gut belüfteten und trockenen Raum aufbewahren.

Die Behälter geben geringe Mengen Sauerstoff ab, die durch eine gute Belüftung abgeführt werden müssen. Lagern Sie Flüssigsauerstoffbehälter nicht im Schrank, Kofferraum oder anderen geschlossenen Räumen. Legen Sie keine Kleidung oder Gardinen auf die Behälter.



Die tragbaren Behälter nicht unter der Kleidung tragen.

Die Geräte geben regelmässig Sauerstoff ab. Ist der tragbare Behälter durch Kleidung bedeckt, kann sich die Kleidung mit Sauerstoff anreichern und bei Kontakt mit einer Zündquelle leicht entzünden.

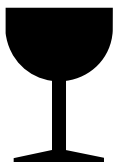

Die Behälter sind zerbrechlich.

Vorsichtig handhaben.



Funktionsstörungen nie ohne fachliche Anleitung beheben.

Bei Zuwiderhandlung lehnt Linde jegliche Haftung ab.



Die tragbaren und stationären Flüssigsauerstoffbehälter sind im gefüllten Zustand für den Transport geeignet.

Stellen Sie sicher, dass die stationären Behälter während des ganzen Transports in der aufrechten Position verbleiben. Rauchen sowie andere Zündquellen sind zwingend zu vermeiden. Linde weist ausdrücklich auf die geltenden SDR/ADR-Bestimmungen zum Transport gefährlicher Güter hin und lehnt jegliche Haftung ab, insbesondere für den privaten Transport der stationären Behälter.